

DK

BETEGNELSE

Til behandling af forkøllessessår (åbent herpessår i munden eller på læberne).

PAKNING

1 plasttube med 6 ml.

INGREDIENSER (INCI)

Glycerin, Mel, Aqua, Vitis Vinifera Seed Extract, Camellia Sinensis Extract, Sambucus Nigra Extract, Xanthan Gum

VIRKNING OG ANVENDELSE

Herpecilin® er en osmotisk aktiv, viskøs, hypertonisk oplosning. Ved påføring på åbne herpeslæsioner danner Herpecilin® en film over læsionen og tiltrækker mekanisk hypotonisk væske, som findes under den beskadigede overflade. Denne stærke, uadgående væskestrøm renser såret for alle de små, forurende stoffer (døde celler, cellerester, bakterie- og viruspartikler, støvpartikler, etc.) og skaber et gunstigt miljø for heling. Filmen beskytter også såret mod torhed, irritation og udefra kommende irriterende elementer. Reduktion af den mikrobielle kontamering,rensning af såret og tilførsel af fugt til læsionens overflade reducerer smerte og irritation og fremmer helingsprocessen

VEJLEDNING

Kun til lokal brug.

Fjern hætten på tuben og påfør 3-4 dråber Herpecilin® direkte på det åbne herpessår, 3-4 gange om dagen, indtil såret er helet fuldstændigt. Luk altid tuben efter brug.

FORHOLDSREGLER

Vask hænder inden brug. Produktet er kun til lokal og udvortes brug på læberne samt i munden. Undgå, at tubens spids kommer i berøring med såret under påføringen.

Du må ikke anvende Herpecilin®, hvis du er overfølsom eller allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne, hvis du tager andre midler mod åbent forkøllessessår, eller hvis symptomerne varer ved. Sog læge, hvis der ikke ses en forbedring inden for syv dage efter, at du er begyndt at bruge Herpecilin®.

Opbevares utilgængeligt for børn og ved stuetemperatur. Anvend ikke produktet efter udløbsdatoen, hvis tuben er beskadiget, eller mere end 30 dage efter, at tuben blev åbnet første gang.

BIVIRKNINGER

Herpecilin® har ingen kendte bivirkninger, og der er ingen risiko ved indtagelse.

Herpecilin® kan anvendes af børn over 3 år samt af gravide og ammende.

Vitro-Bio, Zac de Lavaur, 63500 Issoire, France

Distributør

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark

10/2010

NO

BENEVNELSE

For behandling af forkøllessessår (åpent herpessår i munden eller leppene).

PAKNING

1 plasttube inneholder 6 ml.

INNEHOLDER (INCI)

Glycerin, Mel, Aqua, Vitis Vinifera Seed Extract, Camellia Sinensis Extract, Sambucus Nigra Extract, Xanthan Gum

BRUKSAMRÅDE-VIRKNINGSMEKANISME

Herpecilin® er en osmotisk aktiv, viskøs og hyperton oplosning. Når den appliseres, dannes det en film over det åpne såret som mekanisk tiltrekker hypoton væske som findes under den skadete overflaten. Denne sterke utadgående væskeflyten renser såret for alle små forurensende partikler som findes på innissen av såret (døde celler, cellerester, bakterie- og virusepartikler, støvpartikler) og danner et gunstigt miljø for tilheling av såret. Filmen beskytter også såret mot torrhed, irritation og ytre påvirkninger. Reduksjon av mikrobiell forurensning, rensing av såret og hydriering av såroverflaten reduserer smerte og irritation og påskynder tilheling av såret.

INSTRUKSJONER

Kun til lokal bruk.

Ta av tuppen på tuben og drypp 3 til 4 dråper Herpecilin® direkte på herpeslæsionen 3 til 4 ganger daglig til den er helbredet. Lukk tuben etter bruk.

FORSIKTIGHETSREGLER

Vask hændene før bruk. Dette produktet er kun ment til lokal bruk og skal ikke svølges. Ikke berør læsionen med tubespissen under påføring. Ikke bruk Herpecilin® hvis du er følsom eller allergisk overfor noen af innholdsstoffene, hvis du har andre midler for oral herpes, eller hvis symptomene vedvarer. Rådfør deg med lege hvis du ikke merker noen forbedring innen 7 dagers bruk af Herpecilin®. Oppbevares utilgjengelig for barn, i romtemperatur. Ikke bruk produktet hvis tuben er skadet, eller etter utløpsdatoen eller mer enn 30 dager etter tuben ble åpnet.

BIVIRKNINGER

Herpecilin® har ingen kjente bivirkninger og er ikke farlig å svegle. Herpecilin® kan brukes av barn over 3 år og gravide eller ammende.

Vitro-Bio, Zac de Lavaur, 63500 Issoire, France

Distributør

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark