

Laastari huuliherpeksen hoitoon

 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.

Herpecilin® laastari huuliherpeksen hoitoon (Herpes simplex)

HUULIHERPES

Huuliherpes on huulilla ja suun alueella esiintyvä, viruksen aiheuttama infektio (Herpes simplex -virus). Huuliherpes oireilee aluksi pistelevänä ja kutiavana tunteena tulehdusalueella. Muutaman päivän kuluttua muodostuu rakkula, jonka puhkeaminen muodostaa kivuliaan ja epämiellyttävän haavauman. Huuliherpeksen puhkeamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa stressi, kuukautiset, altistuminen auringonvalolle ja heikentynyt immunitaetti.

HERPECILIN® LAASTARI

Pakkaus sisältää 18 ultraohutta Herpecilin® laastaria, jotka hoitavat huuliherpeshaavaumaa nukkuessasi. Laastari sitoo itseensä nestettä haavaumasta, lievittää kipua ja punoitusta ja vähentää tulehduksen aiheuttamaa kihelmöintiä, kutinaa ja polttavaa tunnetta. Laastari nopeuttaa haavauman parantumista ja vähentää turvotusta, punoitusta ja rakkulan ja ruven muodostumista. Laastari myös suojaa haavaumaa ja vähentää tartuntariskiä.

VAROITUS

Vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä Herpecilin® laastareita, jos olet yliherkkä hydrokolloidille. Älä leikkaa laastaria äläkä käytä laastaria uudelleen. Tuotetta on käsiteltävä huolellisesti ja tässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos olet epävarma siitä, onko kyseessä huuliherpes, käänny lääkärin puoleen ennen hoidon aloittamista. Sopii käytettäväksi myös raskauden ja imetyksen aikana lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Herpecilin® on Unigroup ApS:n rekisteröity tavaramerkki.
Herpecilin® laastari on luokiteltu I luokan lääkinälliseksi laitteeksi
Direktiivin 93/42/ETY mukaisesti.

MITEN HERPECILIN® LAASTARIA KÄYTETÄÄN

Herpecilin® laastaria voidaan käyttää huuliherpeksen kaikissa kehitysvaiheissa, ja parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi käyttö kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Pese kädet ennen Herpecilin® laastarin asettamista sekä laastarin asettamisen jälkeen. Paina laastari ulos foliopakkauksesta välittömästi ennen käyttöä, poista suojapaperi ja aseta laastari haavauman päälle. Vältä laastarin liimapinnan koskettamista.

Laastari kiinnitetään illalla, ja 6-8 tunnin kuluttua laastarin väri muuttuu läpikuultavasta valkoiseksi. Valkoiseksi muututtuaan laastari alkaa irrota ja se voidaan poistaa aamulla.

Illalla asetetaan uusi laastari ja hoitoa jatketaan, kunnes haavauma on parantunut.

Herpecilin-geelin käyttöä suositellaan päiväsaikaan.

HAITTAVAIKUTUKSET

Herpecilin® laastarin käytöllä ei ole tunnettuja haittavaikutuksia.

SÄILYTYS

Säilytetään alkuperäisessä pakkauksessa 2-30°C lämpötilassa, lasten ulottumattomissa ja suoralta auringonvalolta suojattuna. Herpecilin® -tuote voidaan hävittää talousjätteiden mukana.



Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Tanska.
www.unigroup.eu

