

## Lindrende plaster til forkølelsessår

 Les dette pakningsvedlegget nøje før brug.

Herpecilin® plaster til behandling av forkølelsessår (Herpes simplex)

### FORKØLELSESSÅR

Forkølelsessår optræder på læber og i munden, og er forårsaget af virus (Herpes simplex virus). Tilstanden starter oftest med en prikkende og kløende fornemmelse. Efter et par dage dannes der blærer, som brister, og såret der dannes, giver smerte og ubehag. Forkølelsessår kan udløses af forskellige faktorer så som, stress, solesponering, lavt immunforsvar og menstruation.

### HERPECILIN® PLASTRE

Pakningen indeholder 18 ultratynde Herpecilin® plastre, som behandler forkølelsessåret imens du sover. Plastre absorberer sekretion, væske, samt puds fra forkølelsessåret, lindrer smerten og reducerer den prikkende, kløende og brændende fornemmelse. Der opnås en hurtig heling, og rødme, hævelse, sårskorpe- og blæredannelse reduceres. Plastre beskytter endvidere såret og nedsætter risikoen for smitte.

### FORSIGTIG

Kun til udvortes brug. Brug ikke Herpecilin® plastre, såfremt du er overfølsom overfor hydrocolloid. Klip ikke i plasteret og genbrug ikke. Produktet skal håndteres forsigtigt og i henhold til denne instruktion. Hvis du er i tvivl om tilstanden skyldes forkølelsessår, bør du kontakte din læge inden behandling igangsættes. Kan benyttes af gravide og ammende efter konsultation med egen læge.

Herpecilin® er et registreret varemærket tilhørende Unigroup ApS. Herpecilin® plastre er klassificeret som medicinsk udstyr, klasse I, i henhold til 93/42/ EØF om medicinske anordninger

### SÅDAN BRUGES HERPECILIN® PLASTERET

Herpecilin® plasteret kan benyttes på alle stadier af udbruddet, og det er en fordel at påsætte det så tidligt som muligt i forløbet. Vask hænder før og efter påsætning af Herpecilin® plasteret. Umiddelbart inden brug, trykkes plasteret ud af folie pakningen, beskyttelsespapiret fjernes og plasteret påsættes såret. Undgå at berøre den klæbende side af plasteret.

Plasteret påsættes om aftenen og efter 6-8 timer ændrer plasteret farve fra klar til en hvid tone. Det hvidtonede plaster vil begynde at løsne sig og fjernes om morgenen.

Et nyt plaster påsættes om aftenen, og behandlingen fortsættes indtil såret er helet.

Det anbefales at behandle med Herpecilin gel i løbet af dagen.

### BIVIRKNINGER

Der er ingen kendte bivirkninger ved Herpecilin®

### OPBEVARING

Opbevares ved 2-30°C i original pakningen, utilgængeligt for børn og uden for direkte sollys. Herpecilin® produktet kan bortskaffes med husholdningsaffald.



Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Denmark.  
[www.unigroup.eu](http://www.unigroup.eu)

