

Behandlande plåster til förkylningssår

 Läs denna bipacksedel noggrant före användning.

Herpecilin® plåster för behandling av munsår (Herpes simplex)

MUNSÅR

Munsår uppstår på läppar och i munnen och orsakas av ett virus (Herpes simplex virus). Tillståndet börjar oftast med en stickande, kliande känsla. Efter ett par dagar uppstår blåsor som brister och det sår som då bildas orsakar smärta och obehag. Munsår kan utlösas av olika faktorer såsom stress, solexponering, lågt immunförsvar och menstruation. .

HERPECILIN® PLÅSTER

Förpackningen innehåller 18 ultratunna Herpecilin® plåster som behandlar munsåret när du sover. Plåstren absorberar utsöndringar, vätska och var från munsåret, lindrar smärtan och dämpar den stickande, kliande och brännande känslan. Det ger en snabb läkning och reducerar hudrodnad, svullnad samt bildning av sårskorpor och blåsor. Plåstren skyddar även såret och minskar risken för smitta.

FÖRSIKTIGHET

Endast för utvärtes bruk. Använd inte Herpecilin® plåstren om du är överkänslig mot hydrokolloid. Klipp inte i plåstren och återanvänd dem inte. Produkten ska hanteras försiktigt och i enlighet med denna bipacksedel. Om du är osäker på om dina symptom orsakats av munsår bör du kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen. Kan användas av gravida och ammande kvinnor efter samråd med läkare.

Herpecilin® är ett registrerat varumärke som tillhör Unigroup ApS. Herpecilin® plåstren klassificeras som medicinteknisk produkt, klass I, i enlighet med 93/42/EEG om medicintekniska produkter

SÅ ANVÄNDER DU HERPECILIN® PLÅSTRET

Herpecilin® plåstret kan användas under alla stadier av utbrottet, men det är fördelaktigt att applicera det så tidigt som möjligt under förloppet. Tvätta händerna före och efter applicering av Herpecilin® plåstret. Tryck ut plåstret ur folieförpackningen omedelbart före användning, ta bort skyddspapperet och applicera plåstret på såret. Undvik att vidröra plåstrets klistersida.

Plåstret appliceras på kvällen och efter 6–8 timmar ändrar plåstret färg från transparent till vitt. Det vita plåstret kommer att börja lossna och ska tas bort på morgonen.

Ett nytt plåster appliceras på kvällen och behandlingen fortsätter tills såret är helt läkt.


Behandling med Herpecilin gel rekommenderas under dagtid.

BIVERKNINGAR

Det förekommer inga kända biverkningar vid användning av Herpecilin®

FÖRVARING

Förvaras vid 2–30°C i originalförpackning, oåtkomligt för barn och ej i direkt solljus. Herpecilin® produkten kasseras som hushållsavfall.

 Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark.
www.unigroup.eu

