

OGILTIGT

Om det inte syns något rött streck alls i kontrollfönstret, är det hänt ett fel. Sannolikt är det inte kommit urin tillräckligt på testet eller man inte har följt instruktionerna korrekt. Läs bruksanvisningen igen ordentligt och genta testet med ett nytt test. Om du får igen problemەر med testet, kontakta Unigroup ApS.

[BEGRÄNSNINGAR]

- För in vitro-diagnostiskt hemmabruk.
- Testet bör inte användas son preventivmedel.
- Återanvänd inte teststickorna.
- Testresultaten påverkas i regel inte av smärtstillande medel, antibiotika och andra vanliga läkemedel. Medicinering innehållande hCG eller hLH kan påverka testresultatet och bör inte användas i samband med testet. Dessutom kan testet vara missvisande om du är gravid, i klimakteriet eller tar p-piller.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

[FRÅGOR OCH SVAR]

1. När kan jag göra testet?

Vi avråder dig från att använda den första morgonurinen eftersom den är koncentrerad, vilket kan orsaka ett falskt positivt resultat. Varje annan tid på dagen är lämplig. Testa vid ungefär samma tid varje dag. Reducera ditt vätskeintag 2 timmar innan du testar.

2. Kan jag använda Clinic Ägglossningstestet för att undvika att bli gravid?

Nej, testet bör inte användas som preventivmedel.

3. Hur noggranna är Clinic Ägglossningstestet?

En klinisk utvärdering gjordes för att jämföra Clinic Ägglossningstestet med ett annat urin-hLH-test på marknaden. Den interna kliniska utvärderingsmätningarna omfattade 300 urinprover. Resultaten utvisade >99% specificitet och >99% sensitivitet med en total noggrannhet på >99%.

4. Vad betyder det om kontrolllinje inte framträder i resultatområdet?

Om kontrolllinje inte visas i resultatområdet efter 5 minuter är resultatet ogiltigt och du bör upprepa testet med ett nytt test. Kontakta tillverkaren om problemet kvarstår.

5. Jag har testat i flera dagar och jag såg inte någon stegring. Vad gör jag?

Alla kvinnor har inte alltid ägglossning vid mitten av cykeln, så detta kan innebära att du inte har ägglossning ännu och du behöver utföra ytterligare hLH-tester.

6. Jag har testat i 8 dagar eller mer och jag har fortfarande inte hLH-stegring, vad är fel?

Omkring 90% av de som har ägglossning med regelbundna cykler kommer att uppleva hLH-stegring under 8–10 dagars testning. Om du inte gör det, kan det betyda att du inte har ägglossning denna månad. Om du har en kort cykel denna månad, är det möjligt att du har haft ägglossning innan du började testa. Om du har en lång cykel denna månad, kanske du inte har haft ägglossning ännu. Du kan fortsätta testa eller testa igen nästa månad. Oroa dig inte; det är normalt att ha en tillfällig kort eller lång cykel, eller att ha en cykel utan att ha ägglossning.

7. Jag har använt ägglossningstestet i tre månader, och varje månad har jag sett en stegring och har haft samlag den dagen eller natten. Jag har inte blivit gravid ännu. Vad är fel?

Först är det viktigt att komma ihåg att det kan ta många månader för normala, friska par att bli gravida. Det finns många faktorer som kan påverka din förmåga att bli gravid även om du har kunnat ha samlag under dina mest fertila dagar. Om du efter flera månader inte har haft framgång, bör du rådgöra med din läkare eller vårdperson.

8. Vad kan störa mitt testresultat?

Om du redan är gravid, nyligen har varit gravid, eller har nått klimakteriet kan resultatet bli missvisande. Vissa receptbelagda läkemedel, såsom menotropin för injektion kan påverka ditt testresultat. Vänligen rådgöra din läkare om du har några frågor om receptbelagda läkemedelsinteraktioner.

9. Kan p-piller påverka resultatet?

Om du nyligen slutat med p-piller kan din menstruationscykel vara oregelbunden under en tid innan den stabiliserar sig. Det kan vara en god idé att vänta tills du har haft två naturliga menstruationscykler innan du börjar använda testet.

10. Om testet kan avgöra min mest fertila tid, varför kan jag inte använda det som preventivmedel?

Spermier kan överleva upp till 72 timmar, och detta test förutspår endast din hLH-stegring från 24 till 36 timmar i förvägen. Därför kan ägget bli befruktat om du har samlag innan du har påvisat hLH-stegringen.

11. Hur känsliga är Clinic Ägglossningstestet?

Clinic Ägglossningstestet påvisar luteiniserande hormon (LH) i urinen vid koncentrationer på 40 mIU/ml eller mer. Vid tillsats av vanliga hormoner, till exempel FSH (1000mIU/ml), hCG (10.000 mIU/ml) och TSH (1000 µIU/ml) till negativt (0 mIU/ml LH) och positivt (40 mIU/ml LH) prov inträffade ingen korsreaktivitet vid de testade koncentrationerna.

12. Påverkas testresultatet om man intar alkohol eller vanliga läkemedel?

Nej, men du bör kontakta din läkare, om du intar medicin, som innehåller hormon. Om du mycket nyligen har använt p-piller, har ammat eller har varit gravid kan detta påverka testresultatet.

13. Hur länge visas strecken?

Testet bör avläsas efter 5 minuter för att du ska få bästa möjliga resultat. Ett positivt resultat (stegring) försvinner aldrig. De färgade strecken kan bli mörkare och det kan uppstå färgskiftningar i bakgrunden efter några timmar. Ett negativt resultat kan i några fall efter ett tag bli va svagare på grund av avdunstning. Därför skall resultatet avläsas inom 10 minuter. Kassera testet som almnt hushållsavfall när du har läst av resultatet.

14. Just nu använder jag mig av basaltemperaturmätning. Kan detta test ersätta temperaturmätandet?

Clinic Ägglossningstest är inte avsedda att ersätta basaltemperaturmätningar. Den ändrade basaltemperaturen indikerar först och främst att ägglossning redan har ägt rum. Clinic Ägglossningstesten indikerar att ägglossningen kommer att ske.

15. Jag fick ett positivt resultat och hade samlag inom de fertila dagarna men jag blev inte gravid. Vad ska jag göra?

Många faktorer spelar in när det gäller att bli gravid. Det kan ta flera månader för ett normalt, friskt par att bli gravida, och ofta kan man behöva använda test i 3–4 månader, innan man uppnår en graviditet. Om du inte har blivit gravid efter 3–4 månader bör du och din partner uppsöka en läkare.

16. Jag fick ett positivt resultat och hade samlag inom de fertila dagarna. Jag tror att jag är gravid. Hur snabbt gör det att veta säkert?

Med Clinic Graviditetstest får du ett resultat redan samma dag som din menstruation skulle ha kommit.

[BIBLIOGRAFI]

- Elkind-Hirsch, K; Goldzieher, JW; Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology, 67(3): 450-453, 1986.

[KÄYTÖTARKOITUS]

Clinic Ovulaatiotesti on nopea, yksivaiheinen immunokromatografinen testimenetelmä, joka osoittaa, milloin virtsan luteinisoivan hormonin hLH-pitoisuus on korkeimmallaan ovulaation havaitsemisen edistämiseksi. Tulos voidaan lukea visuaalisesti minuutteina osoittamaan joko positiivista tai negatiivista tulosta ovulaatiolle.

[YHTEENVETO]

Ovulaatiossa munasolu irtaao munasarjoista ja kulkeutuu munanjohitteeseen, jossa munasolu voi hedelmöityä. Munasolu voi hedelmöityä vain 24 tunnin kuluessa ovulaatiosta. Juuri ennen ovulaatiota keho tuottaa suuren määrän luteinisoivaa hormonia (hLH), joka laukaisee kypsymeen munasolun vapautumisen munasarjasta. Tämä ”hLH-nousu” tapahtuu yleensä kuukautiskierron puolessa välissä. Clinic Ovulaatiotesti on täydellinen testi, joka auttaa ennustamaan ovulaatioaikaa ja hedelmällisyyden huippuaikaa. Juuri tuona aikana raskauden tapahtuminen on todennäköisintä. Clinic Ovulaatiotesti havaitsee virtsan hLH-nousun, mikä tarkoittaa, että ovulaatio tapahtuu todennäköisesti seuraavan 24-36 tunnin aikana. Tärkeää: hLH-nousua ja ovulaatiota ei välttämättä tapahdu jokaisella kuukautiskierrolla.

[VAIKUTUSTAPA]

Clinic Ovulaatiotesti on nopea, yksivaiheinen immunokromatografinen testimenetelmä, joka osoittaa, milloin virtsan hLH-pitoisuus on korkeimmallaan ja munasolu todennäköisesti irtaao seuraavien 24-36 tunnin kuluessa. Testissä käytetään vasta-aineiden yhdistelmää, muun muassa monoklonaalista hLH-vasta-ainetta, jolla mitataan kohonneita hLH-arvoja. Kun testilaitte kastetaan virtsaan, kapillaari-ilmiö kuljettaa virtsanäytteen eteenpäin testin kalvaa pitkin. Jos ilmenee hLH:a, hLH:n ja vasta-aineiden välillä tapahtuu immunologinen reaktio, ja siihen ilmenee selvä punasävyinen viiva.

hLH-pitoisuudesta riippuen testiviiva muuttuu vaaleammaksi tai tummemmaksi. Toiset vasta-aineet aktivoivat ohjauslinjan. Tämän viivan ilmestyminen osoittaa, että testi on tehty oikein. Tätä menetelmää kutsutaan immunokromatografiaksi.

[NÄYTEEN KERÄÄMINEN JA VALMISTAMINEN]

- Parhaan tuloksen optimaalisen ajan keräykseen saa, kun virtsankeräily tapahtuu päivittäin samaan aikaan. Älä kerää ensimmäistä virtsanäytettä heti herättyäsi.
- Vähennä nesteen juomista noin 2 tuntia ennen virtsankeräystä.
- Kirjaa virtsan keruun päivämäärä, kiertopäivä ja –aika. Katso TESTITUL-OSKAAVIO pakkausselosteen lopusta.
- Käytä uutta näytekeräyssastia jokaiselle näytteelle.
- Virtsaa voidaan säilyttää huoneenlämpöässä jopa 8 tuntia tai 2-8 asteessa enintään 24 tuntia. Älä jäädytä. Parhaan tuloksen saamiseksi testaa virtsa samana päivänä, kun se kerätään. Jos virtsanäyte on jäädytetty, anna virtsan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testausta Älä ravista säiliötä. Mikäli keräyssastian pohjalle muodostuu sedimentti, keräystuma, anna sen laskeutua. Käytä vain säiliön yläosassa olevaa virtsaa.

[HUOMIOITAVAA]

- Lue koko pakkausseloste ja siinä olevat ohjeet huolellisesti ennen testin tekemistä.
- Testiä ei saa käyttää viimeinen käyttöpäivän jälkeen.
- Älä käytä testiä, jos suoja pakkaus on vioittunut.
- Säilytettävä kuivassa paikassa 2–30°C:n lämpötilassa. Ei saa jäättyä.
- Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Avaa suoja pakkaus vasta sitten, kun olet valmis tekemään testin.
- Tarkoitettu vain in-vitro diagnostiikkaan, ei sisäiseen käyttöön.
- Käytetyt testiliuskat hävitetään tavallisen kotitalousjätteen tapaan.
- Kertakäyttöinen.

[SÄILYTYS]

Testiä tulee säilyttää kuivassa +2 - +30°C lämpötiloissa, eikä testiä saa käyttää eräpäivän jälkeen. Sulje foliopussi välittömästi käytön jälkeen. Auringonvalolle, kosteudelle ja kuumuudelle altistumista vältettävä.

[SISÄLTÖ]

Toimitetut materiaalit:

- Testiliuskaa (5)
- Käyttöohjeet

Tarvittavat materiaalit, joita ei toimiteta:

- Näytekeräyssastia (Huom: Ei sisälly Clinic BASIC Ovulaatiotesti).
- Ajastin

Milloin testi kannattaa tehdä

Kuukautiskierronpituus	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Ensimmäinentestauspäivä	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[KÄYTÖOHJEET]

MILLOIN TESTI KANNATTAA TEHDÄ

Pakkauksessa on viisi testiä, joten voit tehdä testejä monena peräk käisenä päivänä saadaksesi selville, milloin sinulla on hedelmällisin jakso. Alla olevan taulukon avulla voit laskea, milloin sinun tulisi aloittaa testien tekeminen.

- Määritä ensin kuukautiskierron pituus, joka lasketaan kuukautiskierron ensimmäisestä vuotapäivästä viimeiseen päivään ennen seuraavan kuukautiskierron alkamispäivää (seuraavien kuukautisten ensimmäistä vuotapäivää).
- Laske sitten ne päivät kuukautisten jälkeen, jolloin testi tulisi aloittaa. Tarkista alla olevan taulukon ensimmäisen rivin avulla, mikä on oman kahden kuukautiskierron välinen pituus ja katso sitten toiselta riviltä vastaavat päivät, jolloin testi tulisi tehdä.
- Laske testin aloituspäivä alla olevan esimerkin mukaan. Ensimmäistä aamu-virtsaa EI saa käyttää hLH-arvon mittaukseen. Paras tulos saavutetaan, kun teet testin suunnilleen samaan aikaan joka päivä. Älä juo paljon nestettä testiä edeltävän kahden tunnin aikana.

Kalerieriesimerkki												
S	M	T	O	T	F	L						
5	1	2	③	4	5	6						
7	8	9	10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20						
21	22	23	24	25	26	27						
28	29	30	31	32	33	34						

Esimerkki: Kuukautiskierroni normaalipituus on 28 päivää. Edelliset kuukautiset alkoivat 3. päivä. ”Kalerieriesimerkki” -taulukon mukaan minun pitäisi laskea 11 päivää eteenpäin kolmannelta päivästä alkaen. Kun lasken kaleristeriä 11 päivää eteenpäin, näen, että minun pitää aloittaa virtsanäytteiden testaus 13.


[TESTIN TEKEMINEN]

Ota selville ”Milloin testi kannattaa tehdä” -taulukon avulla päivä, jolloin voit aloittaa testin tekemisen.

- Anna testi- ja virtsanäytteen lämmetä huoneenlämpöiseksi (15-30°C) ennen testausta.
- Pussin tulee olla huoneenlämpöinen ennen sen avaamista. Poista testiliuska suljetusta pussista ja käytä se tunnin kuluessa.
- Laita testiliuskan kärkiosa pystysuorassa asennossa virtsaastiaan (nuolet testiliuskassa osoittavat virtsan suuntaan) ja anna liuskan olla virtsanäytteessä vähintään 10-15 sekuntia. Tarkista, että virtsanäyte ei ylitä liuskaan merkittyä enimmäisarjaa (MAX). Katso alla oleva kuva.
- Nosta testiliuska astiasta ja aseta se tasaiselle ei-imukyiselle alustalle ja tarkista aika. Odota, kunnes näkyviin tulee yksi tai useampi punainen viiva. Kun virtsa on imeytynyt testiliuskan läpi, näet todennäköisesti kirrkaanpunaiseksi värjätynneen alueen sekä testiliuskan testikentässä (T) että testikuskentässä (C). Koeutus on valmis noin viiden minuutin kuluussa. Jos näkyviin ei tule punaista viivaa, odota vielä yksi minuutti. Tulos ei ole enää luotettava 10 minuutin jälkeen. Käytetyt testiliuskat hävitetään tavallisen kotitalousjätteen tapaan.

[TESTITULOKSEN LUKEMINEN]

Katso kuva.

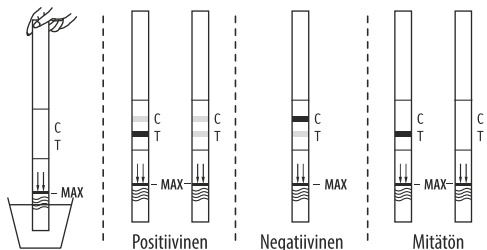

POSITIIVINEN

Näkyviin tulee kaksi värjätynyttä viivaa, ja testikenttä (T) on samanvärinen tai tummempi kuin tarkistuskenttä (C). Tulos tarkoittaa sitä, että munasolu todennäköisesti irtaao 24–36 tunnin kuluessa ja että olet tullut sinun hedelmällisimpään kuukautiskierron jaksoon.

NEGATIIVINEN

Näkyviin tulee yksi tai kaksi värjätynyttä viivaa, mutta testi- kenttä (T) on vaaleampi kuin tarkistuskenttä (C) tai testiken- tässä (T) ei näy mitään viivaa. Tulos tarkoittaa sitä, että hLH-arvot eivät ole kohonneet. Testiä testi noin 24 tunnin kuluttua.

MITÄTÖN TULOS

Jos testi-ikkunaan ei ilmesty punaista viivaa, on jokin mennyt testissä väkään. Luultavasti virtsaa ei ole tullut riittävästi testiliuskan päälle tai ohjeita ei ole seurattu tarkoin. Lue uudelleen käyttöohjeet ja tee testi uudelleen uudella testiliuskalla. Jos ongelmia yhä ilmenee, ota yhteys Unigroup ApS:ään.

[HUOMIOITAVAA]

- In vitro -diagnostiseen kotikäyttöön.
- Testiä ei pidä käyttää ehkäisykeinoana.
- Älä käytä testiliuskaa uudelleen.
- Kipulääkkeet, antibiootit ja muut yleiset lääkkeet eivät vaikuta testituloksiin. HCG:tä tai hLH:tä sisältävä lääkitys voi vaikuttaa testiin, eikä niitä tule ottaa käytettäessä testiä. Lisäksi testi ei toimi kunnolla raskaana olevilla, vaihdevuosien aikana tai jos käytetään ehkäisy pillereitä.
- Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.

[KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA]

1. Milloin voin tehdä testin?

Ensimmäisen aamun virtsan testaamista ei suositella, koska se on konsentroituneinta ja voi antaa positiivisen tuloksen. Mikä tahansa muu vuorokauden aika on sopiva. Testaa päivittäin samaan aikaan ja vähennä nesteen juomista 2 tuntia ennen testausta.

2. Voinko luottaa siihen, että Clinic Ovulaatiotestin avulla voi välttyä tulemasta raskaaksi?

Ei. Testiä ei pidä käyttää ehkäisykeinoana.

3. Milloin luotettava Clinic Ovulaatiotesti on?

Kliinisissä tutkimuksissa verrattiin Clinic Ovulaatiotestiä toisen valmistajan vastaavaan virtsasta otettavaan hLH-testiin. Tutkittavana oli 300 virtsanäytettä. Tulokset osoittivat, että Clinicin tarkkuus ja luotettavuus olivat yli 99% prosenttia, ja myös yleinen tyytyväisyys ylitti 99% prosentin rajan.

4. Viivat eivät tule esiin tarkistuskentän alueella?

Tulos ei kelpaa, mikäli tarkistuskentän alueelle ei ilmesty viivaa 5 minuutin kuluussa ja silloin on tehtävä uusi testi. Mikäli ongelma toistuu uudestaan, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan.

5. Olen testannut useita päiviä, enkä näe nousua. Mitä teen?

Ovulaatio ei tapahdu kaikille aina kierron puolivälissä ja tästä johtuen, Tämä voi tarkoittaa, että ovulaatio ei ole tapahtunut kohdallasi vielä ja sinun tulisi jatkaa testausta ylimääräisellä hLH testillä.

6. Olen testannut 8 vuorokautta tai enemmän, enkä vieläkään näe hLH-nousua, mikä on vialla?

Noin 90% säännöllisillä kierroilla ovuloivista naisista hLH näkee nousunsa 8-10 päivän testauksen aikana. Mikäli et näe nousua, et ole ovuloitunut kyseisen kuan aikana. Lyhyen kierron kuukautena on mahdollista, että ovulaatio tapahtuu ennen testauksen aloittamista. Huolehtiminen on turhaa ja on normaalia, että ajoittain on lyhyempiä ja pitkiä jaksoja ja kierron aikana ei tapahdu ovulaatiota. Tee testi uudestaan seuraavan kuukauden aikana.

7. Olen käyttänyt ovulaatiotestiä kolme kuukautta, ja jokaisen kuukauden aikana nähnyt nousun ja ollut yhdynnässä sinä päivänä ja yönä. En ole tullut raskaaksi vielä. Mikä on ongelma?

Ensiksi on hyvä muistaa, että raskaaksi tuleminen kestää terveillä ja keskiverto parisunnilla useita kuukausia. Raskaaksi tulemiseen vaikuttaa moni asia, vaikka ajankohta yhdynnälle olisi hedelmällisin. Mikäli et ole onnistunut tulemaan raskaaksi yhden kuukauden jälkeen, ole yhteydessä omaan lääkäriin tai terveydenhuollon edustajaan.

8. Mikä voisi häiritä testitulostani?

Saatat saada harhaanjohtavan tuloksen, mikäli olet ja raskaana, olet äskettäin ollut raskaana tai olet saavuttanut vaihdevuodet. Jotkut reseptilääkkeet, kuten menotropiit injektioita varten voivat vaikuttaa näkemisiin tuloksiin. Ota yhteys lääkäriisi, mikäli sinulla on kysyttävää reseptilääkkeiden yhteisvaikutuksista.

9. Vaikuttavatko suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet tulokseen?

Ehkäisy pillereiden käytön jälkeen kierto voi olla epäsäännöllinen ja voi kestää jonkin aikaa saada kierto säännölliseksi. On hyvä odottaa, että on kaksi normaalia jaksoa, ennen kuin aloitat testin käytön.

10. Jos testi voi määrittää hedelmällisimmät aikani, miksi en voi käyttää sitä ehkäisyyn?

Siittiöt voivat selviytyä jopa 72 tuntia, ja tämä testi ennustaa hLH-nousui vain 24-36 tuntia etukäteen. Siksi, jos olet yhdynnässä ennen kuin huomaa nousun, munasolu voi silti hedelmöityä.

11. Miten tarkasti Clinic Ovulaatiotesti mittaa LH-arvo?

Clinic Ovulaatiotesti osoittaa virtsassa olevan luteinisoivan hormonin (LH) määrän, kun sitä on 40 mIU/ml tai enemmän. Yleisesti tunnettujen hormonien, kuten FSH:n (1000mIU/ml), hCG:n (10.000 mIU/ml) ja TSH:n (1000 µIU/ml) lisäksi negatiiviseen (0mIU/ml LH) ja positiiviseen (40mIU/ml LH) testinäytteeseen ei aiheuttanut ristireaktioita mitatulla vahvuksilla.

12. Vaikuttavatko alkoholi tai tavallisimpien lääkkeitten samanaikainen käyttö testitulokseen?

Eivät, mutta sinun tulisi keskustella lääkärin kanssa, jos käytät hormonia sisältäviä valmisteita. Jos olet hilljaltain käyttänyt ehkäisy pillereitä, imetänyt tai ollut raskaana, nämä kaikki voivat vaikuttaa testitulokseen.

13. Miten kauan viivat näkyvät?

Testitulos on luettava 5 minuutin kuluessa testin tekemisestä. Positiivinen tulos (hLH-arvon nousu) ei häviä. Useiden tuntien jälkeen tulos voi muuttua eli värilliset viivat voivat tummentua ja väri voi muuttua taustaltaan kuultavaksi. Negatiiviset tulokset voivat jonkin ajan kuluttua näkyä todella heikosti testikentän kostumisen takia. Tämän vuoksi tulos ei ole luotettava 10 minuutin jälkeen. Hävitä testiliuskat ja pakkaus samoin kuin tavallinen kotitalousjäte.

14. Korvaako tämä testi lämmönmittausmenetelmän?

Clinic Ovulaatiotesti ei korvaa lämmönmittausmenetelmää. Ruumiinlämmön muutokset osoittavat sen, että munasolu on jo irronnut. Clinic Ovulaatiotesti taas osoittaa sen, että munasolu irtaao pakkoon.

15. Testitulos oli positiivinen ja olin yhdynnässä hedelmällisten päivien aikana, mutta en tullut raskaaksi. Mitä teen?

Monet tekijät vaikuttavat siihen, tuleeko nainen raskaaksi. Raskaaksi tuleminen voi viedä kuukausia, jopa pitempäänkin, ja testejä voi joutua tekemään 3–4 kuukautakin ilman, että tuloksia saavute- taan. Jos et ole onnistunut tulemaan raskaaksi 3–4 kuukauden jäl- keen, kehoitamme sinua ja kumppaniasi keskustelemaan lääkärin kanssa.

16. Testitulos oli positiivinen ja olin yhdynnässä hedelmällisten päivien aikana. Luulen, että olen raskaana. Miten nopeasti voin saada asiasta varmuuden?

Clinic Raskaustestin avulla saat vastauksen jo ensimmäisenä päivänä poisjääneiden kuukautisten jälkeen.

[LÄHDELUETTELO]

- Elkind-Hirsch, K; Goldzieher, JW; Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology, 67(3): 450-453, 1986.

	Endast till in vitro diagnostic
	Se ”Förhållningsregler” i bruksanvisningen
	Bevares vid 2-30°C

	Test per sats
	Bäst före
	Lot nummer

	Behörigt ombud
	Till engångsbruk
	Använd inte testet om folieförpackningen är skadad eller förstörd

Unigroup ApS
Diplomvej 373,
DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster
Germany

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development
Area Hangzhou - 310018, P. R. China
www.alltests.com.cn

Nummer 145008904
Effektivt dato 2020-11-12



Unigroup ApS
Diplomvej 373,
DK-2800 Kgs. Lyngby,
Denmark

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 M