



Nilocin Vorte Pen

DK



Føtsende.



VIGTIGT: Læs indlægsedlen omhyggeligt før brug.

Gem denne indlægseddel. Du skal muligvis læse den igen. Spørg din læge, apoteker eller sygeplejerske, hvis du har brug for mere information eller råd.



Kun til udvortes brug.



Opbevares uden for børns synsfelt og rækkevidde.

I denne indlægseddel:

1. Hvad Nilocin® Vorte Pen er, og hvad den bruges til.
2. Hvordan Nilocin® Vorte Pen virker.
3. Før du bruger Nilocin® Vorte Pen.
4. Sådan skal du bruge Nilocin® Vorte Pen.
5. Mulige bivirkninger.
6. Opbevaring.
7. Yderligere information om Nilocin® Vorte Pen.

1 HVAD ER NILOCIN VORTE PEN, OG HVAD ANVENDES DEN TIL

Nilocin® Vorte Pen er et medicinsk udstyr, der bruges til behandling af vorter på fødder, hænder, krop, arme og ben. Den er velegnet til behandling af voksne og børn fra fire år.

• Vorter er små vækster i huden forårsaget af den humane papillomavirus (HPV). Vorter forekommer ofte på fingrene, på bagsiden af hænderne eller på fodsålen. Du kan genkende den almindelige vorte på overfladens ru 'blomkålsignende' udseende. De kan være smertefulde og ligner ofte en lille hvid hudring med sorte prikker i midten. Vorteviruset er smitsomt. Vorter kan vokse og sprede sig, især hvis de ikke behandles. Vorteviruset kan også overføres til andre dele af kroppen eller fra en person til en anden.

2 SÅDAN FUNGERER NILOCIN VORTE PEN

Nilocin® Vorte Pen er specielt designet til brug direkte på vorter. Efter påføring, spredes væsken lokalt i vorten. Pennen indeholder myresyre, som udtørrer den inficerede hud og dermed behandler vorten.

3 FØR DU BRUGER NILOCIN VORTE PEN

Brug ikke Nilocin® Vorte Pen, hvis du er allergisk (overfølsom) over for nogen af indholdsstofferne anført i afsnit 7, samt hvis du er overfølsom overfor bistik eller myrebid.

- Må ikke anvendes til børn under 4 år.
- Der skal udvises ekstra forsigtighed, hvis du har diabetes eller lider af dårlig blodcirkulation (perifer vaskulær sygdom) i dine hænder eller fødder.
- Brug ikke Nilocin® Vorte Pen i nærheden af dit ansigt, hals, armhuler, bryster, kønsorganer/slimhinder.
- Må ikke bruges på "vorter" med hår, der vokser fra dem, ansigtsvorter, modermærker, pigmenteret hud eller beskadiget hud. Hvis du er usikker på, om du har en vorte, der er egnet til behandling med Nilocin® Vorte Pen, så spørg din læge, farmaceut eller sygeplejerske, inden behandlingen påbegyndes.
- Påfør ikke Nilocin® Vorte Pen på ømme eller blødende vorter, irriteret, betændt, blæret eller beskadiget hud. Vent indtil huden er restitueret.
- Må ikke bruges i kombination med andre behandlinger til fjernelse af vorter.
- Undgå unødvendig udsættelse for sollys, da dette kan forårsage midlertidig misfarvning (enten mørkere eller lysere) af den behandlede hud.
- Dæk ikke det behandlede område med et plaster. Brug af et plaster efter behandling kan forårsage hudskader.

Vær særlig forsigtig, når du bruger dette produkt, det indeholder et ætsende middel med en stærk lugt. Må ikke indhaleres. Påfør behandlingen et sted med god ventilation. Ryst ikke pennen.

Behandlingen påføres forsigtigt og kun på vorten. Du behøver kun at påføre en lille mængde for at opnå effekt.

- Pas på ikke at påføre behandlingen på omgivende sund hud, især på mindre børns sarte hud. Ved forkert eller overdreven påføring kan behandlingen resultere i blærer, betændelse, vævsskader, ar, forbrændinger eller andre sår.
- Når behandlingen bruges på børn, skal den af sikkerhedsmæssige årsager altid påføres af en voksen. For voksne, på svært tilgængelige steder, bør behandlingen altid påføres af en anden voksen.
- Der er ingen specifikke kendte risici for gravide eller ammende, det anbefales dog at konsultere læge, farmaceut eller sygeplejerske før brug.
- HVIS PRODUKTET KOMMER I KONTAKT MED ØJNENE ELLER SLIMHINDERNE, SKYL STRAKS MED RIGELIGT VAND I 15 MINUTTER KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE.

4 SÅDAN BRUGER DU NILOCIN® VORTE PEN

Nilocin® Vorte Pen leverer en lille mængde farveløs væske. Ryst ikke pennen, da dette kan beskadige den og forårsage at pennen lækker. Før første brug, eller hvis du er i tvivl om pennen er fugtig, trykkes spidsen af pennen mod et stykke absorberende papir, for at kontrollere at væsken flyder.

Indledningsvist behandles med en kort kontakttid. Se yderligere vedrørende antal sekunders kontakttid nedenfor. Det præcise antal sekunders applicering, der kræves, afhænger af størrelsen, alderen og placeringen af den vorte, du behandler. Se yderligere information nedenfor. Det er bedre at anvende for lidt behandling, hvis du er i tvivl.

Behandl 3 gange ugentligt, på dag 1, 3 og 5, efterfulgt af 2 dages pause. Se nedenfor vedrørende kontakttid Brug kun på vorter, på steder, hvor det anbefales. Overskrid ikke frekvensen, antallet af anbefalede applikationer eller den maksimale kontakttid. Fortsæt behandlingen indtil vorten forsvinder eller maksimalt 6 uger.

- A. Det anbefales af blodgøre vorten i lunkest vand i minimum 5 minutter inden behandlingen.
- B. Såfremt vorten er dækket af hård hud, kan vorten forsigtigt skræbes på overfladen. Den hårde hud fjernes forsigtigt. Fil ikke på vorten.
- C. Fjern hæften på pennen.
- D. Vorten masseres forsigtigt med spidsen af behandlingspennen i den passende kontakttid (i henhold til vejledningen nedenfor). Løsningen trænger straks ind i vorten. Sørg for at behandle hele vorten, men pas på ikke at røre eller spille produkt på omgivende sund hud.
- E. Hæften påsættes omhyggeligt efter brug.
- F. Behandl 3 gange ugentligt, på dag 1, 3 og 5, efterfulgt af 2 dages pause. Se nedenfor vedrørende kontakttid.
- G. Vask dine hænder efter berøring af vorter.

Ved første brug skal du være forsigtig, da kun en lille mængde behandling er nødvendig. Start med at behandle en enkelt vorte i 1 sekund for at se, hvordan huden reagerer. Hvis huden er upåvirket, og behandlingen tolereres godt, opbygges kontakttiden gradvist ved at bruge oplysningerne nedenfor som en vejledning:

- For yngre børn (i alderen 4 til 11 år), personer med sart hud, eller små vorter, start forsigtigt og konservativt, og gradvist opbygges behandlingskontakttiden til maksimalt 10 sekunder.
- For større vorter eller genstridige vorter på fodsålen, start forsigtigt og konservativt og gradvist opbygges behandlingskontakttiden til maksimalt 20 sekunder.

Hvis der opstår ubehag eller smerter, stop påføringen. Hvis det brænder, svier, eller hvis opløsningen påføres sund hud, skylles med koldt vand.



5 MULIGE BIVIRKNINGER

Det er vigtigt at produktet anvendes som foreskrevet. Overdreven brug kan forårsage hudskader.

- En let prikkende eller brændende fornemmelse kan i nogle tilfælde mærkes i 10 til 15 minutter efter behandlingen.
- Hvis brugt på sund hud, kan forbigående bivirkninger forekomme, såsom svien, irritation, rødme, smerte eller blødning. Stop behandlingen, indtil huden er helt restitueret, og hold området rent for at undgå mulig infektion.
- Der kan være en forbigående ændring af pigmenteringen i behandlet hud, som udsættes for sol.
- Dette produkt har en stærk lugt. Det kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne, halsen og/eller øjnene. Duft ikke direkte til indholdet af pennen, da dette kan forårsage bivirkninger såsom løbende næse, løbende øjne eller åndedrætsbesvær.
- Konsultér læge, apotekspersonale eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Alvorlige hændelser skal indberettes til producenten eller relevant myndighed.

6 OPBEVARING

Opbevares mellem 2° og 25° C og væk fra direkte sollys. Opbevares i den originale emballage og uden for børns synsfelt og rækkevidde. Påsæt altid hæften omhyggeligt efter brug.

Produktet kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

7 YDERLIGERE OPLYSNINGER OM NILOCIN VORTE PEN

Ingredienser (INCI): Formic acid (85%), Dimethyl isosorbid, Aqua.

Påkkens indhold:

- en behandlingspen indeholdende 3 ml væske (tilstrækkelig til minimum 220 påføringer).
- denne indlægseddel - som du skal læse omhyggeligt inden brug.



Enkelt patient - Flergangsbrug

Nilocin® Vorte Pen er klassificeret og registreret som et CE-mærket Medicinsk Udstyr Klasse Iia.



Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark
Nilocin® er et registreret varemærke tilhørende Unigroup ApS.

Denne indlægseddel blev sidst revideret i januar 2023
Få mere at vide om Nilocin® Vorte Pen på: www.Nilocin.com

For LOT og udløbsdato, se bunden af æsken eller toppen af pennen.

